

Mascherina mod. Magnum art. 035021

Mascherina filtrante per uso civile

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

MANUALE

Le informazioni riportate nel manuale sono di proprietà del fabbricante. Il manuale è destinato all'utente e fornisce le istruzioni per l'uso della mascherina lavabile e riutilizzabile e la sua conservazione. Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso il fabbricante. Il fornitore del tessuto dichiara che le informazioni contenute in questo manuale rispettano le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto.

Conservare con cura il presente manuale. Consultare il manuale per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.

ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza sui prodotti può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato della ditta Lorain S.r.l.

SIMBOLOGIA

	Leggere il manuale prima di ogni utilizzo		Latex Free – prodotto senza lattice
	Proteggere dalla luce solare diretta		Proteggere il prodotto dall'umidità e dagli agenti atmosferici.
	Confezione riciclabile		Smaltire come rifiuto indifferenziato

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:

1. La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) o ventiquattro (24) mesi a seconda della natura giuridica dell'acquirente.
2. La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia le componenti sostituite diventano di proprietà del produttore.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

- 1 Modello e descrizione del prodotto
- 2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
- 3 Descrizione dettagliata del problema

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto oggetto del presente manuale è una mascherina filtrante lavabile, realizzata in tessuto 85% poliestere 15% elastan. La mascherina è una barriera meccanica per evitare la diffusione di contaminazioni da e verso l'esterno e svolge la funzione protettiva delle vie respiratorie dell'utilizzatore da polvere ed altro materiale presente nell'ambiente.

Il prodotto non è sterile ed è riutilizzabile.

DATI TECNICI

Tessuto mascherina: composizione 85% Poliestere 15% Elastan.

Dimensioni (mm): 190 x140

Strati: uno.

Peso (grammi): 5 +/-10%

Colore: bianco o nero

Campo di applicazione ed uso previsto

Il prodotto va utilizzato per ridurre la possibile contaminazione da e verso altri e proteggere le vie respiratorie da polvere e altro materiale.

Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "**CAMPO DI APPLICAZIONE ED USO PREVISTO**".

É inoltre assolutamente vietato:

- a) l'utilizzo della mascherina come dispositivo medico e DPI
- b) l'utilizzo della mascherina da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale
- c) l'utilizzo della mascherina da parte di soggetti allergici alle sostanze di cui è composto il prodotto
- d) l'utilizzo della mascherina da parte di bambini al di sotto dei 6 anni
- e) l'utilizzo della mascherina per applicazioni discordanti da quelle indicate in "**CAMPO DI APPLICAZIONE USO PREVISTO**"
- f) applicare la mascherina sulla pelle lesa o su una ferita
- g) applicare la mascherina su parti del corpo diverse dal viso.

Limiti del prodotto

- Le mascherine non curano alcuna malattia.
- La mascherina non è un dispositivo di protezione individuale, nè un dispositivo medico

RISCHI RESIDUI

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del prodotto, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Nel caso la struttura del prodotto presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale, quale potrebbe essere uno sfregamento contro un materiale abrasivo, tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, la mascherina non potrà più essere utilizzata

Effetti collaterali

Non ci sono effetti collaterali da segnalare nel manuale di istruzioni. Tuttavia, non applicare il prodotto nel caso in cui sulla pelle sia presente una ferita o un'irritazione. In caso d'irritazione causata dal prodotto, sospendere immediatamente l'applicazione e consultare un medico.

Controindicazioni

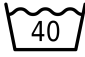




Il prodotto può provocare irritazioni su soggetti particolarmente sensibili od allergici ai materiali con cui è realizzato. Non utilizzare se si è allergici al poliestere o all'elastan.

USO

Utilizzo

- Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone
- Rimuovere la mascherina dalla confezione
- Indossare la mascherina posizionando uno alla volta i fori intorno alle orecchie

Pulizia e disinfezione

	Pulire il prodotto con acqua tiepida e con detersivi neutri e non aggressivi. Può essere lavato anche con acqua tiepida e sapone neutro a mano.
	Non candeggiare
	Asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo. Temperatura ridotta.
	Stirare a temperatura massima di due punti, per riattivare la capacità idrorepellente del tessuto.
	Non lavare a secco

Disinfezione

Nel caso di utilizzo di prodotti disinfettanti, rispettare le indicazioni del fornitore del prodotto disinfettante. Non utilizzare prodotti a base di cloro (candeggina).

Conservazione

Prima di conservare il prodotto verificare che sia pulito.

- Conservare il prodotto in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il prodotto lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.
- Dopo l'utilizzo, riporre la mascherina lavata e completamente asciugata all'interno di un contenitore, al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.

Smaltimento

Al termine dell'utilizzo del prodotto procedere con il suo smaltimento come rifiuto indifferenziato. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati. Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto all'ambiente.